



EINWEISUNG

IN DIE SACH- UND FACHGERECHTE NUTZUNG DER PFLEGEHILFSMITTEL ZUM VERBRAUCH



Bettschutzeinlagen (Einmalgebrauch)

- Die Bettschutzeinlagen bestehen aus flüssigkeitsundurchlässigem Material und einer saugfähigen, hautfreundlichen Schicht aus Vliesmaterial.
- Um die volle Funktionsfähigkeit sowie perfekten Liegekomfort zu gewährleisten, muss die Bettschutzeinlage mit der saugfähigen Vliesseite nach oben positioniert werden.
- Die Bettschutzeinlagen können nicht gewaschen oder wiederaufbereitet werden.



Einmalhandschuhe

- Handschuhe einzeln aus der Box entnehmen.
- Zum Anziehen der Handschuhe müssen die Hände vollständig trocken sein.
- Evtl. benutzte Handcreme sollte vollständig eingezogen sein.
- Zum Ablegen streifen Sie die Handschuhe vom Handgelenk über die kontaminierten Fingerspitzen.
- Achten Sie darauf, dass die Handschuhe keine Risse haben.
- Die Anwendung ist aus hygienischen Gründen zum eigenen Schutz.
- Einmalhandschuhe sind als Vinyl-, Nitril- oder Latexhandschuhe erhältlich sowie in den Größen S, M, L, XL.



Hände-Desinfektionsmittel Sterillium

- Die Anwendung sollte vor und nach jedem Patientenkontakt erfolgen.
- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und Viren
- Nicht in der Nähe von Augen und offenen Wunden anwenden.
- Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel (min 3ml) in die trockene hohle Hand geben und sorgfältig über 30 Sekunden, ohne abzuspülen, verreiben.
- Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen, da sie am häufigsten in direkten Kontakt mit Patienten und potentiell verkeimten Oberflächen kommen.



Mundschutz

- Um höchstmöglichen Sitzkomfort und Hautverträglichkeit zu gewährleisten, ist der Mundschutz mit der grünen Seite nach außen und dem Nasenbügel nach oben anzulegen.
- Fixieren Sie den Mundschutz mit den Ohrschlaufen.



Flächendesinfektionsmittel

- Die Anwendung erfolgt zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im Sprüh-/Wischverfahren, bei der nicht nur eine schnelle Wirkung, sondern auch ein rückstandsfreies Auftrocknen gefordert ist.
- Die zu desinfizierenden Flächen mit einer ausreichenden Menge gebrauchsfertiger Lösung benetzen bis diese vollständig feucht ist.
- Produkt mit einem sauberen Einmaltuch verteilen.
- Fläche während der gesamten Einwirkzeit (30 Sekunden) feucht halten.



Schutzschürzen kurz

- Anwendbar zum Schutz der Kleidung des Patienten beim Darreichen von Nahrung
- Zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Entnehmen Sie die Schutzschürze der Verpackung.
- Bitte mit der rutschfesten, vliesbeschichteten Seite zum Patienten anlegen und mit den Bändern hinter dem Kopf gegen Verrutschen fixieren.
- Die Krümeltasche muss sich auf der dem Patienten abgewandten Seite befinden.



Schutzschürzen lang

- Entnehmen Sie die Schutzschürze der Verpackung.
- Führen Sie den Kopf durch die Schlaufe.
- Für einen perfekten Sitz fixieren Sie die Schürze mit den Bändern auf dem Rücken.
- Für einfache Pflege- und Hygienebereiche